



Insert Code
← Insert Code.
DO NOT PRINT THIS COLOR!

Insert Code
← Insert Code.
DO NOT PRINT THIS COLOR!

EMSER®

HALS- UND RACHENSPRAY

GEBRAUCHSINFORMATION

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollten.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Was ist Emser® Hals- und Rachenspray?

Emser® Hals- und Rachenspray ist ein Lokalthapeutikum zur gezielten Anwendung auf der Hals- und Rachenschleimhaut. Als Wirksubstanz ist ausschließlich Natürliches Emser Salz enthalten. Die komplexe Mineralstoff- und Spurenelementkombination des Natürlichen Emser Salzes löst auf rein natürlicher Basis festsitzende Beläge und mindert den Säurestress der Schleimhäute.

Was ist in Emser® Hals- und Rachenspray enthalten?

100 ml Lösung enthalten: 1,175 g Natürliches Emser Salz, Gereinigtes Wasser.

Emser® Hals- und Rachenspray ist frei von Konservierungsmitteln und chemischen Zusatzstoffen.

Was ist das Besondere an Natürlichem Emser Salz?

Natürliches Emser Salz ist ein sehr komplexes Salzgemisch, welches zahlreiche, für den menschlichen Organismus wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente enthält (Analysedaten der Ionen in g/kg: Lithium 0,21, Natrium 308,7, Kalium 6,11, Magnesium 0,291, Calcium 0,016, Mangan 0,0001, Eisen (II, III) 0,003, Flourid 0,078, Chlorid 188,4, Bromid 0,202, Iodid 0,005, Nitrat 0,355, Sulfat 9,24, Hydrogencarbonat 474,4, Carbonat 14,0).

Wann wird Emser® Hals- und Rachenspray angewendet?

Emser® Hals- und Rachenspray befeuchtet und reinigt die Hals- und Rachenschleimhaut und mindert den Säurestress der Schleimhäute. Emser® Hals- und Rachenspray wird angewendet bei

- Erkältungssymptomen wie Halsschmerzen, Hustenreiz und belegter Stimme
- refluxbedingten Stimmstörungen
- zur Unterstützung und Funktionserhaltung bei starker Stimmbelastung, Schleimhaut-trockenheit (Sicca-Syndromen) und Räusperzwang.

blau = HKS 42 K · 155 x 210 mm



Wann dürfen Sie Emser® Hals- und Rachenspray nicht anwenden?

Bisher sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Was ist bei Kindern und älteren Menschen sowie in der Schwangerschaft und Stillzeit zu beachten?

Emser® Hals- und Rachenspray ist eine reine Lösung des natürlichen Emser Salzes in einer dem Blut angepassten Salzkonzentration. Sie ist für alle Menschen gut verträglich und kann daher in allen oben genannten Fällen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch angewendet werden. Emser® Hals- und Rachenspray ist frei von ätherischen Ölen und gefäßaktiven Substanzen. Dadurch ist es für Schwangere, Kinder und zur Anwendung in der Stillzeit besonders geeignet.

Wie und wie oft sollten Sie Emser® Hals- und Rachenspray anwenden?

Je nach Bedarf ein- bis mehrmals täglich 1–3 Sprühstöße Emser® Hals- und Rachenspray in Hals und Rachen sprühen. Dabei ist die Flasche möglichst senkrecht zu halten.

Wie lange sollten Sie Emser® Hals- und Rachenspray anwenden?

Emser® Hals- und Rachenspray kann unbegrenzte Zeit angewendet werden und ist so auch für die Daueranwendung oder die Behandlung häufig wiederkehrender Atemwegsinfekte optimal geeignet. Sollten sich die Beschwerden trotz der Verwendung von Emser® Hals- und Rachenspray nicht innerhalb von 3 Tagen bessern, empfehlen wir das Aufsuchen eines Arztes.

Welche unerwünschten Wirkungen können bei der Anwendung von Emser® Hals- und Rachenspray auftreten und welche Gegenmaßnahmen sind dann zu ergreifen?

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind bisher keine Nebenwirkungen aufgetreten.

Was ist ferner zu beachten?

Emser® Hals- und Rachenspray ist konservierungsmittelfrei und mit einem Spezialsprühsystem ausgestattet. Dadurch können angebrochene Sprays bis zu 6 Monate nach Erstbenutzung angewendet werden. Emser® Hals- und Rachenspray sollte nicht mehr nach Ablauf des auf der Packung aufgedruckten Verfallsdatums verwendet werden. Bitte immer außer Reichweite von Kindern lagern.

Welche Packungen sind erhältlich?

Emser® Hals- und Rachenspray ist in einer Packung mit 20 ml Lösung zum Einsprühen in Hals und Rachen erhältlich.

Was bedeuten die Symbole auf der Packung?

: Herstellungscharge

: Verfallsdatum

: Bitte Packungsbeilage beachten

: Zertifiziertes Medizinprodukt

: Nicht unterhalb 4°C und nicht oberhalb 50°C lagern

Stand der Information:

April 2010

Herstellung und Vertrieb:

SIEMENS & CO

Postfach 1262, D-56119 Bad Ems

Internet: www.emser.de

E-Mail: info@emser.de



Emser® Hals- und Rachenspray – Profischutz für Hals und Stimme

Lästiger Reizhusten, ständiges Räuspern oder der morgendliche Kloß im Hals – dabei kann es sich um altersbedingte Beschwerden infolge trockener Atemwege handeln.

Hier hilft Emser® Hals- und Rachenspray – und ist gleichzeitig für die Daueranwendung optimal geeignet. Frei von Konservierungsmitteln und ohne ätherische Öle schützt und pflegt es Hals und Stimme Tag für Tag effizient und schonend – allein mit der Kraft der Natur.



D 120

blau = HKS 42 K · 155 x 210 mm

