

Emser® Nasendusche – Anwendungsempfehlung:



Emser Salz®
2,95 g



Emser®
Nasensprüh-
salz 2,5 g

Vorbeugung vor Erkältungskrankheiten		✓
Akuter und chronischer Schnupfen	✓	
Chronische Nasen- und Nasennebenhöhlenentzündungen	✓	
Pollen- und Hausstauballergie		✓
Starke Staubbelastung		✓
Regelmäßige Schleimhautpflege		✓
Trockene Nase		✓
OP-Nachbehandlung	✓	

Emser® Nasendusche mit Emser Salz®

- 100 % natürliche Wirkweise
- Bekämpft die Ursache und lindert die Symptome
- Befeuchtet und reinigt die trockene Nasenschleimhaut



Emser Salz® wirkt 3-fach stark:

- ✓ Emser Salz® verflüssigt zähes Sekret und aktiviert die Selbstreinigungsmechanismen der Nasenschleimhaut.
- ✓ Der spezielle Mineralstoffkomplex des Emser Salzes® puffert saure Stoffwechselprodukte und lindert dadurch Entzündungszeichen.
- ✓ Durch die im Emser Salz® enthaltenen Mineralstoffe und Spurenelemente wird die Wundheilung unterstützt.



EMSER® – GESUNDHEITSPRODUKTE FÜR DIE GANZE FAMILIE



Exklusiv in Ihrer Apotheke!

NATÜRLICH ERSTMAL EMSER®

Emser Salz® / Emser® Nasenspray: Wirkstoff: Natürliches Emser Salz. **Anwendungsgebiete:** Zur unterstützenden Behandlung durch Befeuchtung, Reinigung und Abschwellung der Nasenschleimhaut bei banalen akuten Infektionen der oberen Atemwege und chronischen Nasen- und Nasennebenhöhlenentzündungen und als begleitende Behandlungsmaßnahme zur Beschleunigung des Heilungsprozesses nach endonasaler Nebenhöhlenoperation.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Siemens & Co, Postfach 1262, 56119 Bad Ems.

Folge uns auf Instagram:
@emser_nasendusche, #freeyournose



EMSER® – DAS 1x1 DER NASENSPÜLUNG



532069 – D911



NASENSPÜLUNG – WOHLTUEND UND BEFREIEND

Regelmäßige Nasenspülungen sorgen für ein angenehmes und freies Gefühl im Nasenbereich.

Nasenspülen

- Unterstützung der natürlichen Reinigungsfunktion der Nase
- Stärkung der Abwehrmechanismen
- Befeuchtung der Nasenschleimhaut
- Hilfe bei der Aufrechterhaltung der natürlichen Funktion

Nasenspülen mit isotonen Salzlösungen

- Bedenkenlos über eine längere Zeit anwendbar
- Ideal für die Behandlung häufig wiederkehrender Atemwegsinfekte
- Schonend und nebenwirkungsarm
- Auch während der Schwangerschaft

NASENSPÜLUNG MIT EMSER® – 100 % NATÜRLICHE WIRKWEISE

Emser® Nasendusche mit Emser® Salzen bekämpft die Ursache und lindert Symptome.

Nasenspülung mit Emser Salz®

- Bei banalen akuten Infekten der oberen Atemwege, wie Schnupfen
- Bei chronischer Nasennebenhöhlenentzündung
- Zur Beschleunigung der Heilung nach Nasennebenhöhlenoperationen



Nasenspülung mit Emser® Nasenspülsalz

- Zur täglichen Nasenpflege
- Zur Vorbeugung vor Erkältungskrankheiten
- Bei Pollen- und Hausstauballergie
- Bei trockener Nase durch z. B. Klimaanlage oder Heizungsluft



Die komplette Nase spülen

Optimale Spüldruckregulierung durch integriertes **Deckelventil**

Leicht komprimierbar

Hochelastischer, ergonomisch geformter **Spülbehälter**

Hygienisch, sicher, standfest

Zerlegbar, spülmaschinenfest und auskochbar, mit stabilem **Basisteil** mit Bajonettverschluss

Exakt abgestimmt

Praktische **Portionsbeutel** passend zur Füllmenge der Nasendusche



So einfach ist die Nase wieder sauber und befreit:

1. Nasenansatzstück waagrecht ausklappen & Nasendusche mit handwarmem Wasser befüllen.
2. Je nach Bedarf 1 Beutel Emser® Nasenspülsalz 2,5 g oder 1 Beutel Emser Salz® 2,95 g einfüllen & durch Schwenken auflösen. Nasenansatzstück bis zum Anschlag hochklappen.
3. Nasenansatzstück an ein Nasenloch ansetzen. Flüssigkeit fließt in das eine Nasenloch hinein & läuft durch das andere wieder heraus. Sie läuft nicht in den Rachen, wenn Sie Ihren Mund während der Spülung weit öffnen.



Tipp:

Drückt man den Spülbehälter leicht zusammen, kann die Spüllösung nicht nur den unteren, sondern auch den mittleren und oberen Nasengang erreichen. Dort schließen die Nasennebenhöhlen und das Geruchsorgan an.



Weitere Informationen sowie einen Film zur richtigen Anwendung finden Sie hier: www.emser.de

